


Panneaux latéraux

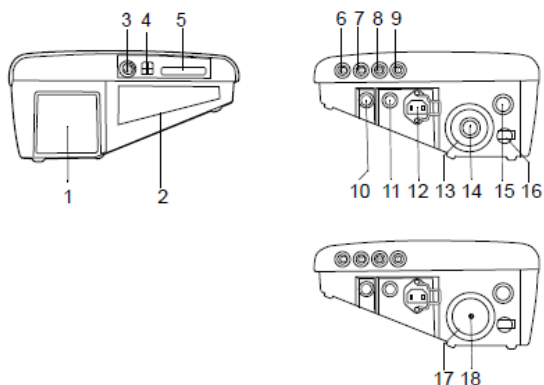

N°

ÉLÉMENT

- 1 Entrée d'air patient
- 2 Entrée d'air de refroidissement
- 3 Appel infirmière / Alarme à distance
- 4 Port de connexion USB
- 5 Lecteur de carte Compact Flash
- 6 Marche / Arrêt à distance
- 7 Port Interface SpO₂
- 8 Port Interface CO₂
- 9 Port Interface FiO_{2i}
- 10 Bouton de mise sous tension
- 11 Entrée DC externe
- 12 Entrée secteur
- 13 Inserts circuits doubles

FONCTION

- Entrée d'air. Logement filtre(s)
- Air de refroidissement interne. Logement filtre
- Connexion pour appel infirmier
- Connexion câble USB liaison PC
- Récupération des données d'observance de la mémoire du Vivo 65
- Téléchargement de la mémoire du Vivo 65.
- Connexion pour module de commande à distance
- Connexion du module SpO₂
- Mesure de l'oxymétrie
- Connexion du module CO₂
- Mesure de la capnographie
- Connexion du capteur FiO_{2i}
- Mesure du mélange Air/O₂
- Marche / Arrêt de l'alimentation
- Mise sous tension
- Raccordement à une source de tension continue (DC) externe
- Connexion alimentation secteur 100 à 240 VAC


Insert circuit adulte

Insert circuit enfant

- 14 Entrée d'air expiré Circuit double
- 15 Sortie d'air vers patient
- 16 Port entrée oxygène
- 17 Insert pour circuit
- 18 Sortie pression de commande de valve expiratoire

- Connexion tuyau air expiré du circuit double
- Connexion tuyau air patient
- Connexion source d'oxygène basse pression
- Connexion changeable pour circuit simple
- Connexion tuyau de pression commande de valve expiratoire circuit simple

Panneau avant

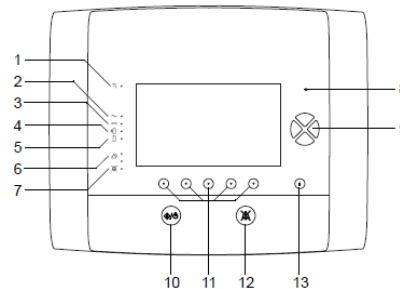

N°

LED

- 1 Déclenchement
- 2 Secteur
- 3 Alim. DC ext
- 4 Batterie click-on
- 5 Batterie interne
- 6 Alarme
- 7 Silence alarme
- 8 Capteur

FONCTION

- Indication de déclenchement inspiratoire
- Alimentation secteur
- Source alimentation DC externe
- Batterie connectable externe
- Batterie interne
- Indication d'alarme (rouge ou jaune)
- Indication d'alarme sonore mise en pause
- Capteur de lumière ambiante

N°

BOUTONS UTILISATEUR

- 9 Navigation/Réglage
- 10 Marche / Arrêt
- 11 Fonction/Navigation
- 12 Pause audio
- 13 Information

FONCTION





- Navigation dans le menu en cours de sélection, définition des réglages
- Démarre et arrête la ventilation
- Fonction variant selon l'affichage
- Met l'alarme sonore en pause
- Montrer / Cacher information

Utilisation d'accessoires

Manipuler les connecteurs avec précaution




Assurez-vous que le marquage est vers le haut.

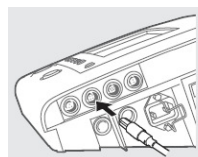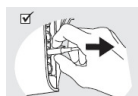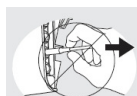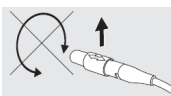

Tirez le manchon du connecteur, pas le câble lui-même pour libérer le connecteur.

Utilisation avec le capteur FiO₂

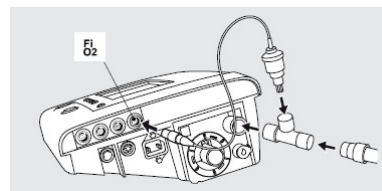

Utilisation avec module d'appel infirmier



vivo65

by Breas

BREAS

Guide simplifié



Pour plus d'informations, visitez :
www.l3medical.fr



L3 Médical

Le Parc des Alpes – 69 bis, rue de Malacombe
38070 Saint Quentin Fallavier – France

Tél.: +33 (0)474 825 727

Fax.: +33 (0)474 827 938


contact@l3medical.com www.l3medical.fr

Guide simplifié d'utilisation


⚠ Ceci n'est pas un guide complet du Vivo 65. Pour des instructions complètes, consultez le manuel.

Mise sous tension

1 Si vous avez accès à l'alimentation secteur, assurez-vous que l'alimentation est correctement connectée.

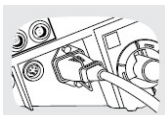


2 Appuyez sur le bouton Stand by du Vivo 65 pour le mettre sous tension et entrer en mode veille.

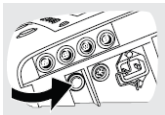

Navigation avec les boutons


Utilisez les cinq boutons de navigation et les boutons haut et bas du panneau afin de vous déplacer dans le menu du Vivo 65. Les boutons de navigation permettent de voir les différentes sections définies au-dessus de chacun de ces boutons. Ces mêmes boutons de navigation peuvent aussi être utilisés pour visualiser les informations supplémentaires de certaines sections ou être attribués à une fonction temporaire quand une fenêtre contextuelle est active.

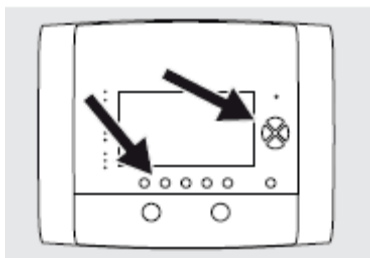

Utilisez les boutons haut et bas pour vous déplacer dans la liste des menus ou sélectionner différents paramètres.

Utilisez les touches fléchées (gauche et droite) pour modifier les paramètres, ou entrez et quittez les sous-menus.

Ecran

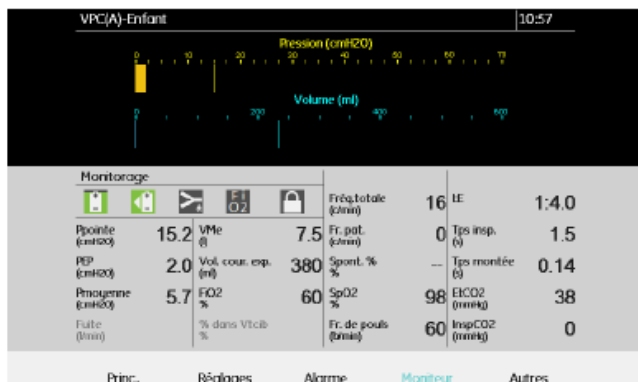

L'écran du Vivo 65 permet de visualiser les courbes, les réglages, les valeurs de monitoring des différents paramètres réglés, les icônes des d'information et les messages d'alarme.


Icône/symboles disponibles

	Niveau batterie interne
	Niveau batterie connectable
	Mode Domicile activé
	Circuit double pour valve expiratoire intégrée sélectionné (Double)
	Circuit simple avec fuite intentionnelle sélectionné (Fuite)
	Circuit simple avec valve expiratoire active sélectionné (Valve expi.)
	Mode de respiration MPV sélectionné. Un circuit avec interface à embout buccal doit être utilisé.
	SpO2 connecté
	FiO2 connecté
	CO2 connecté
	Pages multiples
	Contenu multiple disponible
	Événement d'alarme de priorité élevée dans la liste de l'historique des alarmes
	Événement d'alarme de priorité moyenne dans la liste de l'historique des alarmes

Verrouillage/Déverrouillage Mode domicile/clinique


En mode Domicile, le panneau est verrouillé pour empêcher de repasser en mode Clinique et donc prévenir toute modification accidentelle des réglages.

1 Appuyez et maintenez simultanément les flèches gauche et droite.

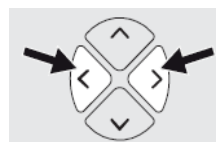


2 Relâchez les boutons quand la barre de progression est remplie.

Dans les réglages généraux du Vivo 65, le verrouillage automatique du clavier peut être ON ou OFF

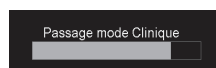


Bouton information

Lorsqu'un paramètre est sélectionné, appuyez sur ce bouton pour avoir l'explication et l'utilité de ce paramètre.

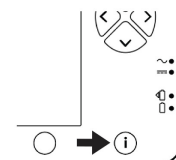

Commencer le traitement


1 Démarrez le traitement et entrez dans le mode de fonctionnement en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt sur le panneau avant.

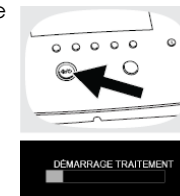

2 Relâchez le bouton Marche/Arrêt quand la barre de progression est remplie.


Arrêter le traitement

1 Pour arrêter le traitement et entrer dans le mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt sur le panneau avant.

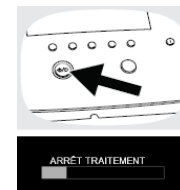

2 Relâchez le bouton Marche/Arrêt quand la barre de progression est complète.

3 Appuyez sur le bouton Inhibition Sonore dans les dix secondes pour arrêter le traitement.

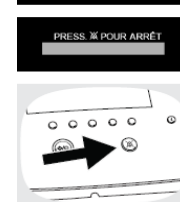

⚠ Arrêtez le traitement avant de déconnecter le circuit patient.


Circuit patient

Le Vivo 65 peut être utilisé avec les circuits suivants :


- Circuit double (utilisation Adulte, 22 mm), connecté à la valve expiratoire intégrée
- Circuit double (utilisation Enfant, 15 mm), connecté à la valve expiratoire intégrée
- Circuit simple avec valve expiratoire active externe ; nécessite un insert pour circuit simple (en option)
- Circuit simple avec fuite intentionnelle externe
- Circuit avec interface à embout buccal.

Le Vivo 65 détecte automatiquement quel insert est utilisé. Avant de brancher un insert, vérifiez que les configurations du mode patient et du type de circuit patient sont correctes.

⚠ Ne retirez pas le joint situé à l'intérieur de la prise d'insert du Vivo 65. Le retrait du joint provoque une fuite dans le circuit patient et une alarme de déconnexion et/ou une alarme erreur de commande de la valve expiratoire.

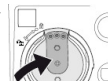




Quelque soit l'insert, verrouillez l'insert en tournant la bague de verrouillage dans le sens horaire, de sorte que l'indicateur pointe vers le symbole de verrouillage sur le ventilateur.

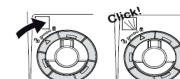

Circuit double

à valve

à fuite

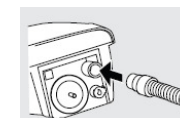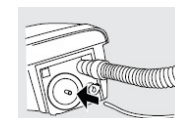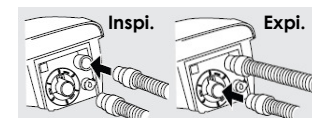

Reportez-vous au Manuel d'utilisation du Vivo 65 pour des instructions complètes sur l'utilisation des inserts et circuits patients Adulte et Enfant.